

ONE BY FOUR TALKER

Bezpečné používání zařízení:

Chraňte přístroj před přímým teplem (radiátory, teploměry atp.), vlhkostí a ostrými předměty. Zařízení není určeno na používání venku či v místnostech s velkou vlhkostí (koupelna atp.)

Povrch čistěte, lehce navlhčenou látkou bez použití agresivních čistících prostředků. Přístroj používejte vždy v souladu s návodem uvedeným níže.

Chraňte přístroj před malými dětmi a zvířaty.

V případě, že chcete přístroj zlikvidovat, odevzdejte jej do sběrný nebo kontejneru určenému pro sběr drobných elektrozařízení.

Návod k použití:

Tento komunikátor určený pro 4 vzkazy v sobě skrývá 4 komunikátory One Talker. Do komunikátoru lze vložit 4 obrázky. Klient, po stlačení obrázku, slyší vzkaz, který je s tímto obrázkem spojen. Kromě tohoto využití lze jednotlivé komunikátory One Talker využívat i samostatně. One Talker je jednovzkazový komunikátor s možností 8 sekund záznamu. Je to malý, lehce přenosný přístroj s integrovaným mikrofonem a reproduktorem s dostatečnou kvalitou zvuku. Zabudované LED diody signalizují režim přehrávání a záznamu.

Před jakoukoliv manipulací nejdříve vyjměte jednotlivé přístroje z kompaktního boxu tak, že je vytlačíte přes otvory na spodní straně boxu

Chcete-li přehrávat již dříve pořízený zvukový záznam, pak přesuňte přepínač na každém přístroji do pozice PLAY. Pro přehrávání záznamu stačí jednou krátce stisknout stříbrné tlačítko uprostřed přístroje, případně libovolné plastové okénko na horní straně boxu, ve kterém jsou komunikátory umístěny.

Záznam lze do komunikátorů nahrát tak, že přesunete přepínač na levé horní straně přístroje do pozice REC. V horní části je umístěn i mikrofon, do něhož hovoříte dostatečně hlasitě zhruba z 10 cm vzdálenosti. Po dokončení nahrávky (u každého přístroje max. 8 sekund) přesuňte přepínač zpět do pozice PLAY. Zvukový záznam lze kdykoliv přehrát jiným zvukem. V případě, že stanovenou dobu nahrávky překročíte, uloží se automaticky jen odpovídající část záznamu.

