

# TALK TIME CARD (Small/A5/A4)

## **Bezpečné používání zařízení:**

Chraňte přístroj před přímým teplem (radiátory, teploměry atp.), vlhkostí a ostrými předměty. Zařízení není určeno na používání venku či v místnostech s velkou vlhkostí (koupelna atp.)

Povrch čistěte, lehce navlhčenou látkou bez použití agresivních čistících prostředků. Přístroj používejte vždy v souladu s návodem uvedeným níže.

Chraňte přístroj před malými dětmi a zvířaty.

V případě, že chcete přístroj zlikvidovat, odevzdejte jej do sběrný nebo kontejneru určenému pro sběr drobných elektrozařízení.

## **Návod k použití:**

Tyto jednovzkazové komunikátory jsou určeny pro jednoduchou komunikaci. Přístroj je určen pro jednorázové použití (nelze u něj vyměnit baterie).

Zelené tlačítko PLAY slouží k přehrání již dříve pořízeného zvukového záznamu. Pro přehrání záznamu stačí tlačítko PLAY jednou krátce stisknout.

Záznam lze do komunikátoru nahrát tak, že stisknete červené tlačítko REC umístěné na zadní straně komunikátoru. Na stejné straně je umístěn i mikrofon, do něhož hovoříte zhruba z 10 cm vzdálenosti. Po celou dobu nahrávání mějte tlačítko REC stisknuté!

Zvukový záznam lze kdykoliv přehrát jiným zvukem.

Doba záznamu je u jednotlivých komunikátorů různá:

Small: 6 sekund

A5: 30 sekund

A4: 10 sekund

V případě, že stanovenou dobu nahrávky překročíte, uloží se automaticky jen odpovídající část záznamu.

Na bílou plochu komunikátoru lze kreslit. Kresba může vhodně doplnit zvuk v komunikátoru. V případě, že budete chtít kresbu v budoucnu odstranit doporučujeme vám používat lihové fixy.