

iTalk2 – návod k použití.

1. Vložení baterií a zapnutí přístroje

Vložte jednu devítivoltovou baterii zespodu do přístroje.
Přístroj zapnete pootočením ovladače hlasitosti.

2. Aktivace nahrávání

Stiskněte a přidržte tlačítko nahrávání (RECORD), které je umístěno na zadní části přístroje. Tlačítko přidržte tak dlouho, dokud se nerozsvítí kontrolka nahrávání (nad tlačítkem RECORD)

3. Nahrání zprávy

Stiskněte spínač, ke kterému chcete nahrát zprávu. Po celou dobu nahrávání držte tlačítko stisknuté. Začněte mluvit po zaznění zvukového signálu (pípnutí). Při nahrávání vzkazu kontrolka RECORD bliká. Po ukončení nahrávání uvolněte stisknutý spínač.

Mluvte přirozeným hlasem, cca 20 cm od mikrofonu, který je umístěn na zadní straně přístroje (nad tlačítkem RECORD).

Stejný postup opakujte i pro nahrání vzkazu pro druhý spínač


4. Ukončení nahrávání

Stiskněte a uvolněte tlačítko RECORD

Poznámka: Tento přístroj umožňuje nahrání maximálně dvouminutové zprávy. Pokud vám zbývá posledních 10 sekund nahrávky, kontrolka RECORD bude blikat žlutě.

5. Přehrávání zpráv

Po dokončení nahrání zpráv pro oba spínače je přístroj připraven k použití.

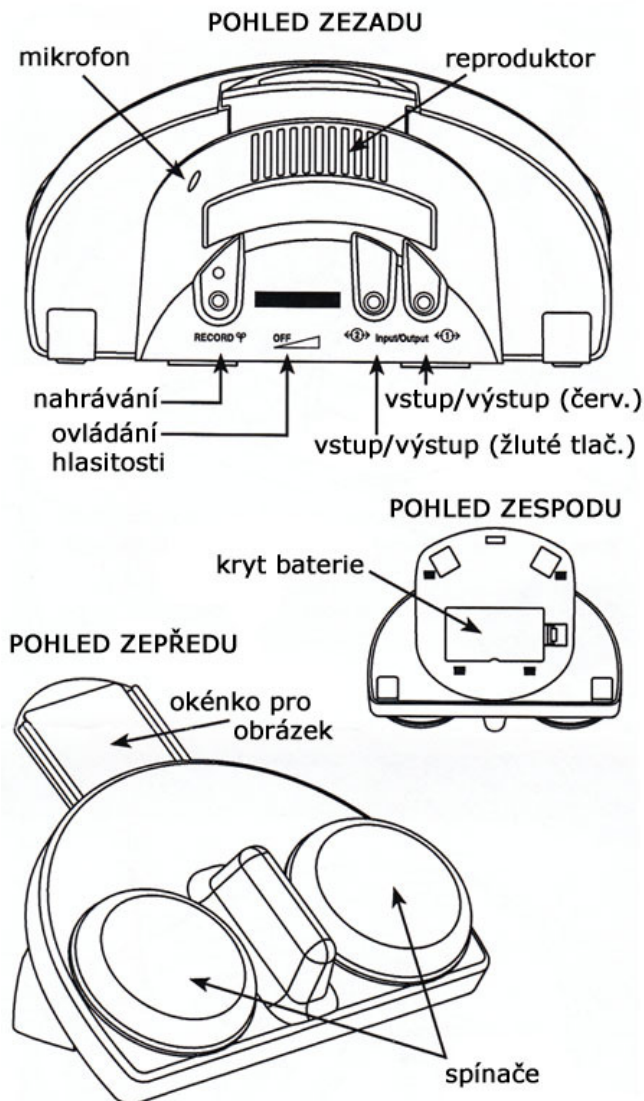

Ovládání hraček a nízkonapěťových přístrojů a využití přístroje jako externího spínače pro ovládání počítače

V balení najdete 2 káblíky s 3,5 JACK mono konektory, které můžete využít pro ovládání hraček a elektropřístrojů (přes bateriový adaptér), nebo pro zjednodušené ovládání speciálních programů v počítači (přes speciální rozhraní - interface – například SK2).

Konektory zasuněte do odpovídajících zdířek v zadní části přístroje a připojte je k příslušnému adaptéru.

Použití obrázku (symbolu)

V případě použití vzorového obrázku může klient provádět výběr ze dvou možností - například k obrázku sluníčka může vybírat odpovídající barvu (žlutou) atp.

Komunikátor obsahuje odnímatelné průhledné plexi krytky, takže každé tlačítko lze doplnit vhodným obrázkem (barvou).